


I Swing™ Brystpumpe

Morsmelk er den beste næring for spedbarn. Swing gir deg og barnet ditt optimal hjelp i ammeperioden. Den attraktive brystpumpen er spesielt passende for pumping både regelmessig og med uregelmessige mellomrom, og vil også stimulere melkeproduksjonen over lengre tid.

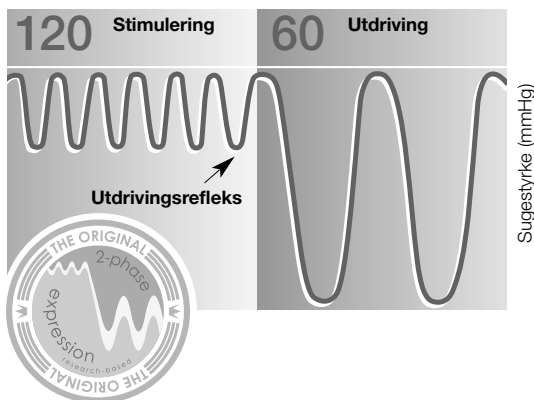

Swing har et 2-Phase Expression® som etterligner barnets naturlige sugeteknikk, noe som gjør produktet behagelig og effektivt. Pumpen starter med en hurtig pumperytme for å stimulere melkeutdrivingen. Deretter simuleres barnets roligere sugerytme. Slik får du pumpet mest mulig melk på en skånsom, naturlig og rask måte.

II Bruksområder

- Pumping av morsmelk mens du er på jobb eller borte fra barnet i andre sammenhenger.
- Opprettholde melkeproduksjon ved midlertidige opphold i ammingen.
- Lindring av kolikk.
- For hjemmebruk og på reise.

III Viktige sikkerhetsregler

Når du bruker elektriske apparater, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler, bl.a.:


Les hele bruksanvisningen før bruk.

- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten etter bruk.
- Du kan bare være sikker på at strømmen er frakoblet ved å ta støpselet på strømadapteren ut av stikkontakten.
- Ikke bruk apparatet i badekaret eller dusjen.
- Unngå å legge eller slippe motoren i vann eller annen væske.
- Ta aldri i et elektrisk apparat som har falt i vann. Trekk ut støpselet umiddelbart.
- Ikke la produktet bli vått.
- Bruk aldri et elektrisk apparat som har skadet ledning eller støpsel, som ikke virker som det skal, som har falt i bakken, er skadet eller har vært i vann.
- Hold strømadapteren unna varme overflater.
- Pass på at spenningen som er angitt på nettadapteren, stemmer overens med spenningen i stikkontakten.
- Bruk kun nettadapteren som følger med Swing-pumpen.

- Adapteren skal først tilkobles brystpumpen og deretter stikkontakten.
- Produktet bør aldri være uten tilsyn når det er koblet til stikkontakten.
- Kontroller punpesettets deler for slitasje og skader.
- Bruk kun originaltilbehør fra Medela.
- Ikke bruk produktet til andre formål enn det er beregnet til.
- Vær spesielt oppmerksom hvis produktet brukes i nærheten av barn.
- Hvis du opplever problemer eller smerte ved bruk, ta kontakt med helsepersonell.
- Utstyret er ikke egnet for bruk i nærheten av brennbar anestesiblanding med luft eller oksygen.
- Bærbart og mobilt RF-basert kommunikasjonsutstyr kan virke inn på Swing-pumpen.
- Swing-pumpen krever spesielle sikkerhetstiltak mht. elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og må installeres og idriftsettes i henhold til EMC-informasjonen i denne bruksanvisningen.


TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN

IV Drift

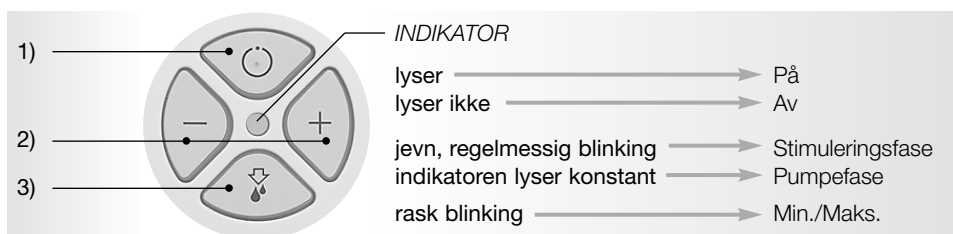

- 1) Av / på-knapp
- 2) Knapp for økt vakuumeffekt (+)
Knapp for redusert vakuumeffekt (-)
- 3) Knapp for uttømming


V Monteringsanvisning

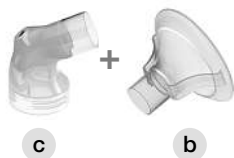

Pass på at brystskjoldet og koblingsstykket er sikkert tilkoblet.



Trykk/press membranen på ventilen til membranen ligger helt flatt.

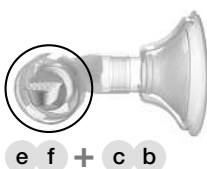


Skyv ventilen med membran på koblingsstykket. Pass på at ventilen plasseres sidelengs, som vist på figuren.



Skru flasken på koblingsstykket.



Stikk adapterenden til slangen inn i åpningen i koblingsstykket.

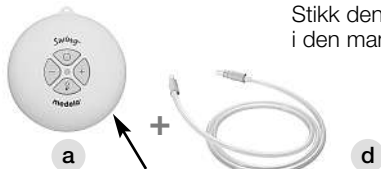

Stikk den andre enden av slangen i den mangedantede porten.




Plugg den elektriske koblingen i enden av strømadapterledningen inn i strøm-kontakten (4.8 V DC).

VI Batteridrift



For å sette i batteriene må du først skyve sperren mot klemmen for å åpne dekselet til batterihuset.

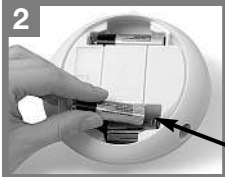

Sett batteriene i riktig vei, som vist på innsiden av batterihuset, og sett/trykk dekselet på plass (AA Mignon LR6).


VII Pumping

Finn en behagelig sittestilling. Bruk en fotskammel når du pumper eller ammer. Med føttene hevet får du riktig sittestilling og du unngår overbelastning av nedre deler av ryggen og bekkenbunn.



Plasser brystskjoldet over brystvorten.

- Pass på å ikke velte eller fylle for mye i beholderne når du pumper.
- Sørg for at det ikke blir bøyd på slangen mens du pumper.

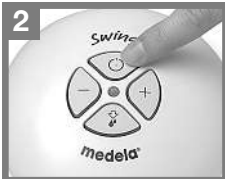

Slå på brystpumpen og begynn stimuleringsfasen ved å trykke på av/på-knappen.



Under pumping kan du justere vakuuet til et behagelig nivå ved hjelp av knappene for øking (+) eller reduisering (-). Juster vakuumnivået raskere ved å holde knappen (+ eller -) nede.



Etter to minutter går stimuleringsfasen automatisk over til utdrivningsfasen. Hvis melken begynner å strøme før utdrivningsfasen begynner, kan du pumpe mer effektivt ved å trykke på «uttømmingsknappen». Juster vakuumnivået om nødvendig. Når du er ferdig med å pumpe, skal du slå av brystpumpen. Trekk ut kontakten og ta pumpestettets deler fra hverandre. Lukk flasken og lagre den for senere bruk.

Bruk flaskestativet for å hindre at flaskene velter.

VIII Rengjøring og hygiene

Følg disse rengjøringsanvisningene med mindre du har fått annen beskjed fra helsepersonell.

Viktig Før rengjøring og sterilisering må alle deler tas fra hverandre. Vær spesielt nøye med å fjerne det gule ventilhodet fra brystskjoldet og ta den hvite membranen av ventilhodet.

Før første gangs bruk og en gang daglig

- Vask og skyll alle delene til pumpesettet som kommer i kontakt med brystet og melken.
- Legg alle delene i en tilstrekkelig stor kasserolle. Fyll på med kaldt vann til delene er dekket. Varm opp og la koke i 3 minutter.
- Ta kasserollen av platen, hell av vannet og la delene avkjøles og lufttørke på et rent håndkle.

Alternativt kan delene vaskes på øverste hulle i oppvaskmaskinen.

Etter hver bruk

- Demonter og vask alle delene til pumpesettet som kommer i kontakt med brystet og melken i varmt såpevann.
- Skyll i rent vann og la delene lufttørke på et rent håndkle.
- Bruk en fuktig (ikke våt) klut til å tørke av brystpumpens motorenhet og bag etter hver bruk.

Pleie av slangen

Kontroller slangen for kondens og/eller melk etter hver pumping.

Hvis det oppstår kondens i slangen

Når du er ferdig med å pumpe, lar du pumpen gå med slangen tilkoblet i 1 – 2 minutter eller til slangen er tørr.

Hvis det kommer melk inn i slangen

Hvis det ved et uhell kommer melk inn i slangen, slår du av pumpen og kobler den fra strømkilden. Fjern og rengjør slangen i henhold til anvisningene «Før første gangs bruk og en gang daglig».

Rist ut vanndråper, heng opp slangen og la den lufttørke. For raskere tørking kan du feste slangen til pumpen og la pumpen gå i 1 – 2 minutter eller til slangen tørker.

Tips

Pakk delene inn i et rent håndkle eller oppbevar dem i en eske når de ikke er i bruk.

Hygiene

- Vask hendene grundig med såpe og vann før du berører brystet og pumpens deler.
- Unngå å berøre innsiden av flasker og lokk.
- Vask brystene og brystvortene med en fuktig klut. For å unngå tørr hud og såre brystvorter må du ikke bruke såpe eller alkohol.

IX Lagring og tining av morsmelk

Be om nærmere råd på sykehuset.

Morsmelklagring (For sunne og friske spedbarn)

	Romtemperatur	Kjøleskap	Fryseavdeling i kjøleskap	Dypfryser
Frisk, nytappet morsmelk	Må ikke oppbevares i romtemperatur	3 – 5 dager ved ca. 4 °C	6 måneder ved ca. -16 °C	12 måneder ved ca. -18 °C
Opptint morsmelk (som har vært frosset)	Må ikke lagres	10 timer	Må ikke fryses om igjen	

- Ved frysing av melk må flaskene/posene aldri fylles mer enn 3/4 fulle, da innholdet utvider seg.
- Merk flaskene/posene med pumpe dato.
- Tin frossen melk i kjøleskapet over natten eller ved å holde flasken/posen under varmt vann.
- Risk flasken/posen forsiktig for å blande eventuelt fett som har skilt seg ut.
- Tin aldri frossen morsmelk i mikrobølgeovn eller en gryte med kokende vann.

X Feilsøking

Hvis pumpen ikke suger eller suger for svakt

Kontroller at

- brystskjoldet ligger tett til brystet.
- alle tilkoblinger mellom pumpesettet og brystpumpen er sikre.
- den hvite membranen ligger flatt mot det gule ventilhodet. Sjekk at ventilhodet er rent og uskadet. Se «Monteringsanvisning».
- slangeendene er festet sikkert til baksiden av brystskjoldet og i porten på brystpumpen.
- slangen er koblet til slangeporten, ikke til strømkontakten. Se «Monteringsanvisning».

Pass på at det ikke blir bøy på slangen. Hvis det kommer melk opp i slangen, må du kontrollere at slangen ikke er klemt eller bøyd.

Ved overstrømming

Hvis det ved et uhell kommer melk inn i pumpen

Slå av pumpen og trekk støpselet ut av stikkkontakten. Tørk av brystpumpen med en fuktig (ikke våt) klut og gå deretter frem på følgende måte:

1. Åpne batteridekselet og ta ut skumgummi-kledningen.
2. Vask skumgummi-kledningen i rent, lunkent vann og klem godt ut. La tørke helt.
3. Hell ca. 2 dl varmt såpevann i en beholder.
4. Koble slangen og strømledningen til pumpen.
5. Hold den enden av slangen som ikke er tilkoblet pumpen, i beholderen med såpevann.
6. Hold produktet over en vask og slå det på. Vannet pumpes gjennom slangen, inn i produktet og renner ut igjen gjennom åpningen under batteridekselet. La pumpingen pågå til alt vannet har strømmet gjennom.

X Feilsøking

Ved overstrømming

7. Gjenta denne prosedyren med 2 dl rent, varmt vann.
8. La deretter pumpen gå i 3 minutter til, slik at den tørker.
9. Når skumgummi-kledningen er tørr, sett den på plass igjen og lukk batteridekselet.
10. Om nødvendig skal pumpesettet rengjøres i henhold til rengjøringsanvisningene «Før første gangs bruk og en gang daglig».

Hvis det kommer melk inn i slangen

Se «Pleie av slangen» under rengjøringsanvisningene.

Produktet er igjen klart til bruk.

XI Garanti

Dette produktet er beregnet for én person. Bruk av mer enn én person kan medføre helsefare, og garantien opphører. 1-års garanti på produktet fra kjøpsdato, med unntak av pumpesettet. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skade eller følgeskade som skyldes feilbetjening, upassende bruk eller uautorisert bruk.

XII Kassering

Apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Elektronisk utstyr skal kasseres i henhold til lokale forskrifter. Elektronisk utstyr som ikke avhendes forskriftsmessig, kan få miljø- og helsemessige konsekvenser.

a	Motorenhet	800.0705
b	SoftFit™ Brystskjold	810.0402
c	Koblingsstykke	800.7171
d	PVC-slange, 75 cm, 3.18 mm I.D/ 5.44 mm O.D	800.0836
e	Ventiltopp	810.0475
f	Ventilmembran	820.7013
g	Flaske (150 ml)	811.0021
h	Stativ	810.0462
i	Swing™ Oppbevaringsbag	800.0838
j	Bærerem	800.0734
k	Hette	810.0474
l	Lokk	810.7062
m	Skive	810.0473
n1	Nettadapter (EURO)	920.0044
n2	Nettadapter (UK)	920.0046
n3	Nettadapter (US/JP)	920.0043
n4	Nettadapter (AUS/NZ)	920.0045

*Med forbehold om tekniske endringer.
Produktet kan variere fra bildet.*